



Quality for life

# ProSeal System

## Snadné proximální těsnění podtlakových lůžek

ProSeal je systém pro proximální utěsnění podtlakových lůžek, který vyniká svou jednoduchostí a snadným použitím.

Systém se skládá ze dvou komponentů:

- kroužku ProSeal 452A1
- lineru ProSeal SIL 6Y81

Kroužek je vyrobený ze silikonu a upevňuje se uvnitř pahýlového lůžka, aby zajistil proximální utěsnění podtlakového systému např. u vybavení s jednocestným ventilem. Silikonový liner bez potahu tvoří rozhraní mezi pokožkou a kroužkem.

# ProSeal System


## Kroužek ProSeal 452A1=\*

- 1 Těsnící silikonový kroužek
- 2 Laminační pomůcka
- 3 Flexibilní fixační kroužek

Lze použít nejen v případě TF lůžek, ale i pro exartikulace v kolenním kloubu a amputace v bérce v kombinaci s různými podtlakovými systémy.

## ProSeal SIL Liner 6Y81=\*

- 4 Silikonový liner 3 mm
  - nepřilnavý vnější povrch
  - hebký vnitřní povrch

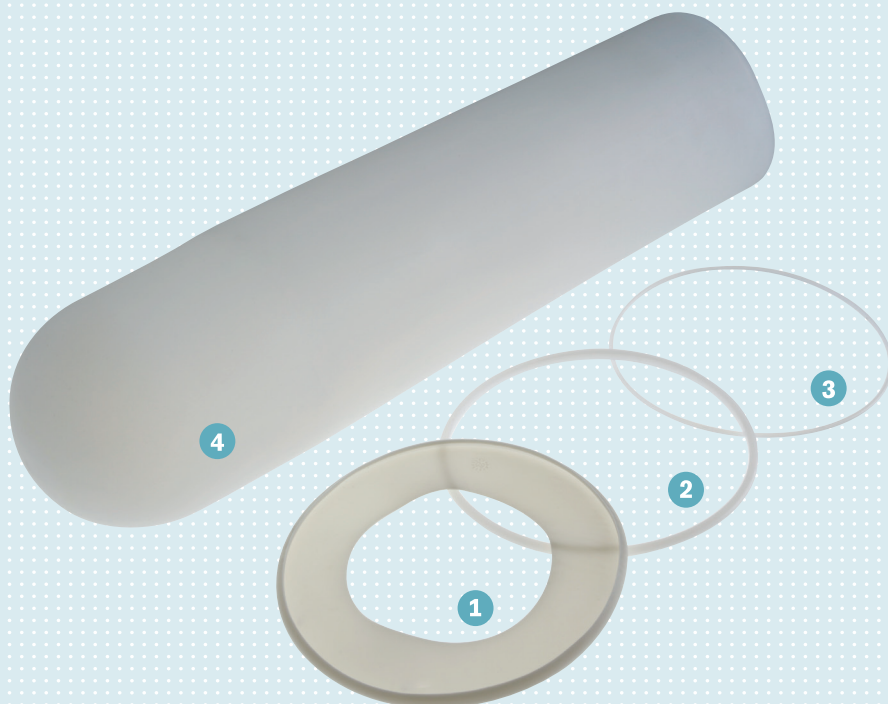

## Hlavní výhody

- Maximalizace plochy podtlaku
- Lepší ulpění na celém povrchu
- Možnost individuálního polohování

### Snadné použití pro ortotika-protetika

- Nejsou zapotřebí téměř žádné zvláštní pracovní kroky

### Indikace

- Transfemorální amputace
- Exartikulace v kolenním kloubu
- Transtibiální amputace
- Minimální délka pahýlu 13 cm
- Stupeň aktivity 2 – 4

## Informace pro objednání

Systém ProSeal se skládá z kroužku ProSeal a silikonového ProSeal lineru.

Doporučujeme používat s jednocestným ventilem **PushValve 21Y14**

### Komponenty systému

#### Kroužek ProSeal 452A1=\*

Silikonový těsnící kroužek se zvláštním fixačním kroužkem a laminační pomůckou pro vytvoření drážky v pahýlovém lůžku.



Obj. č.	Velikosti (obvod 30-50 mm pod perineem)			
452A1=*	320	400	480	560
	340	420	500	580
	360	440	520	600
	380	460	540	640

#### Silikonový liner ProSeal 6Y81=\*

Silikonový liner, tl. stěny 3 mm, bez potahu, nepřilnavá povrchová úprava, hebký vnitřní povrch

Obj. č.	Velikosti (obvod 40 mm nad distálním koncem)			
6Y81=*	280	340	400	500
	300	360	420	550
	320	380	450	

- U exartikulací v kolenním kloubu a TT amputací možno kombinovat s linery bez textilního potahu (např. 6Y512, 6Y416)

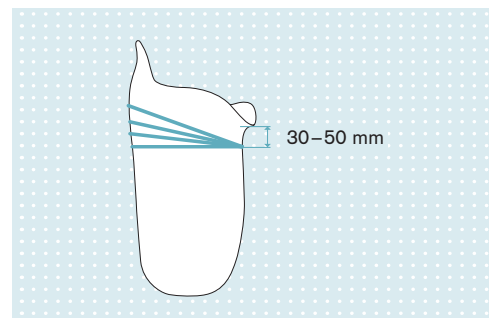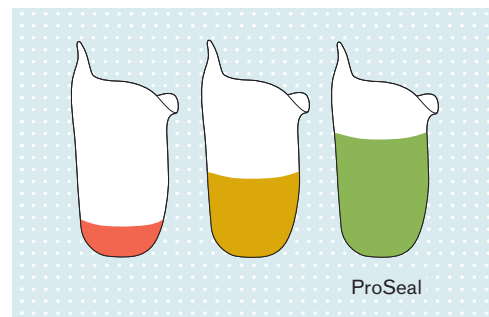

- Možnosti uložení kroužku